

ALLEVYN[®] THIN

Selbsthaftender Wundverband aus Polyurethanschaum

Den Inhalt nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung offen oder beschädigt ist.

und für guten Kontakt sorgen. ALLEVYN Thin benötigt keine zusätzliche Befestigung.

Beschreibung

ALLEVYN Thin ist ein selbsthaftender zweilagiger Wundverband. Er besteht aus einer Polyurethanmatrix mit eingebetteten Superabsorbentien und einer äußeren wasserdampfdurchlässigen und atmungsaktiven Polyurethanfolie, die das Eindringen von Wasser und Keimen verhindert.

Wirkungsweise

ALLEVYN Thin schafft ein feuchtes Wundmilieu. Der Verband kann leicht angelegt und entfernt werden. Seine Flexibilität erlaubt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten – auch an stark konturierten Körperteilen.

Indikationen

ALLEVYN Thin -Verbände können zur Behandlung von oberflächigen Wunden mit geringer bis mäßiger Sekretion wie Verbrennungen zweiten Grades, Druckgeschwüren, Beingeschwüren, postoperativen Wunden und Abschürfungen verwendet werden.

Anwendungsanleitung

1. Die Wunde mit isotonischer Kochsalzlösung oder Ringerlösung reinigen.
2. Eine passende Verbandsgröße wählen, so dass die Ränder der Wunde um mindestens 2 cm überlappt werden. ALLEVYN Thin Verbände können zur Abdeckung von Wunden an schwierigen Stellen eingeschnitten werden.
3. Die Haut um den Wundbereich muss trocken und sauber sein. Übermäßiger Haarwuchs sollte entfernt werden, um eine sichere Abdeckung der Wunde zu ermöglichen.
4. Das Klebeschutzpapier entfernen.
5. Die selbsthaftende Seite des Verbands auf die Wunde auflegen

Häufigkeit des Verbandwechsels

Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Wundsekretionsmenge ab. Den Verband wechseln, wenn sich der Sekundärverband hebt oder wenn eine Durchtränkung erkennbar ist. Zwischen dem Verbandswechsel können ein bis mehrere Tage liegen. Einmal wöchentlich ist ein Verbandswechsel notwendig. Während der frühen Stadien der Wundbehandlung sollte ALLEVYN Thin häufig kontrolliert werden.

Verbandsentfernung

Um ALLEVYN Thin zu entfernen, eine Ecke des Verbands anheben und nach hinten abziehen.

Kombination mit anderen Behandlungen:

ALLEVYN Thin kann in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden verwendet werden, z.B. Kompressionstherapie unter der Anleitung von medizinischem Fachpersonal.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Verwendung von Oxidationsmitteln, z.B. Wasserstoffperoxyd und Hypochloritlösungen sollte in Verbindung mit ALLEVYN Thin vermieden werden.

Kontraindikationen

Nicht bei Wunden mit offenliegenden Muskeln, Bändern oder Knochen verwenden, bei denen die Gefahr des Austrocknens besteht. Nicht bei Wunden verwenden, bei denen die umgebende Haut verletzt oder empfindlich ist. Wenn Infektionen vermutet werden, z.B. wegen Rötung oder übelriechender Sekrete, einen Arzt zur Hilfe ziehen. Infizierte Wunden sollten täglich inspiziert und entsprechend behandelt werden.

Hersteller Smith & Nephew Medical Ltd, Hull HU3 2BN England
Smith & Nephew GmbH, Wound Management, Max-Planck-Str 1-3,
D-34253 Lohfelden. Tel: 0 561 9514 0.

©Warenzeichen von Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2007

CE
0086



Anzahl der Verbände

Selbsthaftend

Selbsthaftend

STERILE R

Gamma sterilisiert



Für schwach bis mäßig nässende Wunden



Nur zur einmaligen Benutzung



Trocken lagern (<25°C)



Bitte Beipackzettel beachten